

最長  
**10年**  
使用可能

連続  
**8時間**  
使用可能

生理中でも快適に  
月経カップ・ディスクで毎日を自由に！

100%医療用シリコン使用の安心感

MERMAID・マーメイド



RURI・ルリ



RUNA・ルナ



BELL・ベル



一般医療機器



セラフィナシリーズ


# Serafina Series

## 月経カップ&ディスク

医療機器認証番号：13B2X10459000007

月経カップ・月経ディスクとは、膣の中に挿入し経血をためる生理用品です。  
ナプキンやタンポンにあった肌トラブルなどの問題の軽減が期待できます。  
繰り返し使えて環境にも優しい**新しい生理用品の選択肢**です。

### セラフィナカップ・ディスクの構造

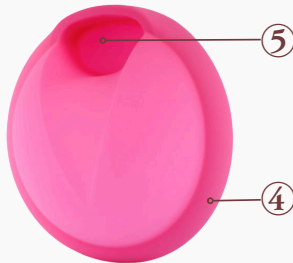


- |      |                  |
|------|------------------|
| ①ステム | 挿入・取り出し時のガイド     |
| ②リブ  | 取り出し時の滑り止め用      |
| ③目盛り | 経血用を測れる目盛り付き(ml) |
| ④リム  | 経血漏れのないように密着する縁  |
| ⑤くぼみ | 挿入・取り出し時のガイド     |

### セラフィナカップ・ディスクの使い方

#### ① 挿入

月経カップ・手指を洗い  
スクワットなどの楽な態勢で  
折りたたんだカップを挿入します。

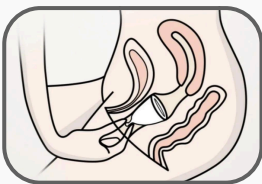

#### ② 取り出す

セラフィナシリーズはすべて  
**最大8時間**使用可能です。  
指でステムやくぼみを掴み取り出します。

#### ③ 洗浄・消毒


カップ・ディスクにたまった経血を捨て  
**必ず**洗浄・消毒を行います。  
使用後は、収納ケースに保管しましょう。

※使用前、使用後は必ず煮沸などで消毒・洗浄を行ってからご使用ください。  
※使用中に痛み・かゆみが生じた場合直ちに使用をおやめください。  
※使用時間は必ず守ってください。

## BELL - ベル -

はじめての月経カップにはリングタイプがオススメ♪  
リングに指をひっかけerことで、  
誰でも挿入も取り出しもスムーズ!

S(20ml)・L(30ml)

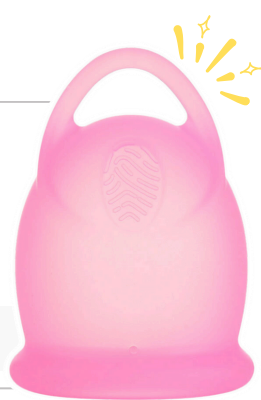

## MERMAID - マーメイド -

月経カップが細長く、挿入しやすいため  
膣が小さめな方・初心者におすすめ♪  
ステムも膣内に当たる面積が少なく違和感も少ない!

S(20ml)・L(30ml)



## RURI - ルリ -

ボールタイプは、膣内に当たる面積が少ないので  
使用中の違和感を軽減したい方にオススメ♪  
取り出しもボールをつかんでスルッと!

S(28ml)・L(37ml)



## RUNA - ルナ -

月経カップよりもさらに奥にセット!  
リムの下のかぼみに指をひっかけて挿入や取り出しが簡単♪  
経血の嫌なドロツと感も少なく!

S(30ml)・L(40ml)



おすすめ

＼初心者 & 10代の方 /



＼出産経験のある方 /



＼経血が多い方 /



私らしい生理を応援するパートナー



# Serafina Cup

ソーシャルメディア公式アカウント



**FUJI** MEDICAL  
SERVICE

株式会社富士メディカルサービス  
〒123-0863  
東京都足立区谷在家1-19-7  
TEL : 03-5856-8047  
FAX : 03-5856-8048  
Mail : fuji.shop@fuji-medicalservice.co.jp

販売業者：